

Hyabak®

**Orvostechnikai eszköz. Alkalmazás előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót.
Őrizze meg az útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá.**

JAVALLAT

A HYABAK szemcsepp a szemek és kontaktlencsék nedvesítése és síkosítására javallott.
Kizárólag szemészeti alkalmazásra.

KINEK JAVASOLHATÓ

- Felnőttek számára,
- Bármilyen típusú kontaktlencsét viselők számára.

ELLENJAVALLATOK

Ne fecskendezze be, illetve ne nyelje le az oldatot.

Ne használja, ha allergiás a HYABAK szemcsepp bármely összetevőjére (lásd A készítmény leírása).

Várandóság vagy szoptatás esetén csak kifejezetten kezelőorvosa tanácsára használja, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat ezen esetekben történő alkalmazásról.

Gyermekek esetében csak kifejezetten a kezelőorvos tanácsára használja, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat ezen esetben történő alkalmazásról.

A KÉSZÍTMÉNY LEÍRÁSA

A HYABAK szemcsepp egy szemészeti oldat, amely nátrium-hialuronátot (0,15%), nátrium-kloridot, aktinokinolt, trometamolt, sósavat és injekcióhoz való vizet tartalmaz.

A HYABAK egy steril, foszfátmentes, hipotóniás és pH-semleges oldat.

Az oldat ABAK® többadagos cseppentőtartályban kerül forgalomba. Ez az innovatív és szabadalmaztatott eszköz 0,2 µm-es szűrőn keresztül szűri az oldatot, amely megakadályozza annak bakteriális szennyeződését tartósítószer használata nélkül. A HYABAK ezáltal kíméli a szemet, mivel tartósítószer-mentes. A tartósítószer mentesség biztosítja a szem szöveteinek védelmét, és nem okoz tüneteket a tartósítószerekre érzékeny felhasználóknál sem.

TULAJDONSÁGOK, HATÁSMECHANIZMUS

A HYABAK szemcsepp használata a szemek nedvesítésére és síkosítására javasolt, a szemet ért külső irritáló tényezők – mint például szél, füst, szennyezés, por, száraz meleg, légkondicionálás, repülőút, a számítógép képernyője előtt végzett hosszú ideig tartó munka – következtében fellépő szárazságérzetet vagy szemfáradtságot esetén. Használata azonnali megkönnyebbülést nyújt és a szemeknek kellemes érzetet biztosít a nap folyamán.

A HYABAK szemcsepp kontaktlencsét viselők számára is javasolt. Síkosítja és nedvesíti a lencsét, így biztosítva a komfortos viseletet a nap folyamán, valamint könnyebbé téve a lencse behelyezését illetve eltávolítását.

A nátrium-hialuronát, mely természetes körülmények között az emberi szemben is megtalálható, megkötö a vizet, hogy nedvesítse és síkosítsa a szem felszínét. Ez az anyag segít a szemcsepp oldatát a szemfelszínen tartani, így biztosítva a kellemetlen tünetek hosszan tartó enyhülését, és rövidítve a szaruhártya felszínének gyógyulási idejét.

A HYABAK szemcsepp aktinokinolt (UV-sugárzás ellen védő tulajdonságokkal rendelkező összetevő) is tartalmaz.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI JAVASLATOK

A HYABAK szemcsepp használata nem igényel különleges ismereteket. Alaposan mosson kezet használat előtt.

A cseppentőtartály kinyitásához nem szükséges egyéb eszközt használnia. A HYABAK szemcsepp első használatakor úgy találhatja, hogy az első csepp megjelenése hosszabb ideig tart, ez az egyedi szűrőrendszer kialakítása miatt (lásd A készítmény leírása) lehet így.

Használat után a cseppentőtartály kupakját csavarja vissza.

A szem nedvesítése és síkosítása :

Adagolás : mindkét szembe egy-egy csepp, szükség szerinti gyakorisággal a nap folyamán.

Cseppentsen egy csepp HYABAK szemcseppet a kötőhártyaszákba, miközben óvatosan lehúzza az alsó szemhéjat és felfelé néz. Ezt követően óvatosan csukja be a szemet.



Kontaktlencsék nedvesítése és síkosítása :

Adagolás : egy csepp az egyes lencsére behelyezéskor és eltávolításakor, illetve a nap folyamán szükség szerinti gyakorisággal.

Mielőtt a kontaktlencsét betesz, tegyen egy csepp oldatot a kontaktlencse belső oldalára, amikor az még az ujján van.

Helyezze be a kontaktlencsét a szokásos módon, majd pislogjon, hogy a folyadék egyenletesen el tudjon terülni a kontaktlencse és a szemfelszín között.



AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készítmény egy személy többszöri használatára készült.

A fertőzések átvitelének elkerülése érdekében több ember ne használjon közösen azonos cseppentőtartályt.

Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét az első használat előtt. A biztonsági gyűrű sérülése esetén ne használja a készítményt.
A cseppentőtartály cseppentőjének csúcsát soha ne érintse hozzá semmilyen felülethez, így a szeméhez sem, mivel ez a készítmény szennyeződését eredményezheti.
Ha tünetei nem szűnnek vagy súlyosabbá válnak, vegye fel a kapcsolatot egészségügyi szakemberrel.

FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekektől elzárva tartandó.

Használat után ne vezessen vagy kezeljen gépeket, ha a látása elmosódott, várjon néhány perct, amíg a látása kitisztul.

Két különböző szemészeti készítmény alkalmazása között várjon legalább 10 perct.

Ne higítsa fel, vagy keverje össze más készítménnyel.

Az első használat után alacsony légköri nyomás esetén a tartály szivároghat. A készítmény UV-sugárzás ellen védő tulajdonsága nem helyettesíti a napszemüveg viselését.

MELLÉKHATÁSOK

A következő mellékhatásokat jelentették: ritkán előfordulhat a szem enyhe irritációja és vörösödése. Ezekben az esetekben a kontaktlencsét viselőök el kell távolítsák a kontaktlencséjüket.

Amikor szemcseppet használ, tapasztalhat zavaró tüneteket, mint például égő, szúró érzést, idegentest érzését a szemben és homályos látást rövid ideig.

Ha a termék használata után bármilyen mellékhatást vagy szokatlan érzést észlel, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberhez, és jelentse az információt a helyi forgalmazónak, a gyártónak vagy a helyi egészségügyi hatóságnak (az elérhetőségeket lásd a használati útmutató végén).

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK ÉS EGYÉB, A KÉSZÍTMÉNY KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Tárolja a készítményt 8 °C – 30 °C között.

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy nedvességnek. Ne használja a címkén és a dobozon feltüntetett lejárati idő után.

A lejárati idő a hónap utolsó napjára vonatkozik, feltéve, hogy a csomagolás sértetlen és megfelelően tárolták.

Felbontás után legfeljebb 3 hónapig használható. Ezt követően a megmaradt készítményt ki kell dobni.

A készítményt a helyi útmutatásoknak megfelelően (a tartályt háztartási hulladékként, a dobozt és a használati útmutatót újrahasznosítható papírként) kell kezelni.

A használati útmutató kiadási dátuma és verziószáma: 2019. november, ver. 3

Gyártó :



Laboratoires Théa 12 rue Louis Blériot


63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Franciaország www.laboratoires-thea.com

Forgalmazó :

Sager Pharma Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Illetékes egészségügyi hatóság :

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. (amd.vig@ogyei.gov.hu)

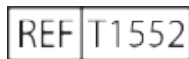

A CSOMAGOLÁSON TALÁLHATÓ KÉPJELZÉSEK JELENTÉSE

	Gyártó		ostechnikai eszköz
	Gyártási szám		Olvassa el a használati útmutatót
	Gyártási idő		beteg többszöri használatára
	Felhasználhatósági idő		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Tárolási hőmérséklet		Figyelmeztetés
	Aszeptikusan sterilizett		Katalógus szám