

# Hyabak®

**Orvostechnikai eszköz. Alkalmazás előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót.  
Őrizze meg az útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá.**

## JAVALLAT

A HYABAK szemcsepp a szemek és nedvesítésére és síkosítására javallott szemszárazság érzete vagy a szemek fáradtsága esetén. A HYABAK a lencsék síkosítására is használható amennyiben a kontaktlencsék viselése kényelmetlenné válik. Kizárólag szemészeti alkalmazásra.

## KINEK JAVASOLHATÓ

- Felnöttek számára,
- Bármilyen típusú kontaktlencsét viselők számára.

## ELLENJAVALLATOK

Ne fecskendezze be, illetve ne nyelje le az oldatot.

Ne használja, ha allergiás a HYABAK szemcsepp bármely összetevőjére (lásd A készítmény leírása).

**Várandósság vagy szoptatás esetén csak kifejezetten kezelőorvosa tanácsára használja, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat ezen esetekben történő alkalmazásról.**

**Gyermekek esetében csak kifejezetten a kezelőorvos tanácsára használja, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat ezen esetben történő alkalmazásról.**

## A KÉSZÍTMÉNY LEÍRÁSA

A HYABAK szemcsepp egy szemészeti oldat, amely hialuronsavat (0,15% nátrium-hialuronátként), nátrium-kloridot, aktinokintol, trometamol, hidrogén- kloridot és injekcióhoz való vizet (T1552 formula) tartalmaz.

A HYABAK egy steril, foszfátmentes, hipotóniás és pH-semleges oldat.

Az oldat ABAK® többadagos cseppentőtartályban kerül forgalomba. Ez az innovatív és szabadalmaztatott eszköz 0,2 µm-es szűrőn keresztül szűri az oldatot, amely megakadályozza annak bakteriális szennyeződését tartósítószer használata nélkül. A HYABAK ezáltal kíméli a szemet, mivel tartósítószer-mentes. A tartósítószer mentesség biztosítja a szem szöveteinek védelmét, és nem okoz tüneteket a tartósítószerre érzékeny felhasználóknál sem.

## TULAJDONSÁGOK, HATÁSMECHANIZMUS

A HYABAK szemcsepp használata a szemek nedvesítésére és síkosítására javasolt, a szemet ért külső irritáló tényezők – mint például szél, füst, szennyezés, por, száraz meleg, légkondicionálás, repülőút, a számítógép képernyője előtt végzett hosszú ideig tartó munka – következtében fellépő szárazságérzet vagy szemfáradtság esetén. Használata azonnali megkönnyebbülést nyújt és a szemeknek kellemes érzetet biztosít a nap folyamán.

A HYABAK szemcsepp kontaktlencsét viselők számára is javasolt. Síkosítja és nedvesíti a lencséket, így biztosítja a komfortos viseletet a nap folyamán, valamint könnyebbé téve a lencse behelyezését illetve eltávolítását.

A HYABAK szemcsepp fő összetevője a hialuronsav (nátrium- hialuronátként), mely természetes körülmények között az emberi szemben is megtalálható, megkötö a vizet, hogy nedvesítse és síkosítsa a szem felszínét. Ez az anyag segít a szemcsepp oldatát a szemfelszínen tartani, így biztosítva a kellemetlen tünetek hosszan tartó enyhülését, és rövidítve a szaruhártya felszínének gyógyulási idejét.

A HYABAK szemcsepp aktinokintol (UV-sugárzás ellen védő tulajdonságokkal rendelkező összetevő) is tartalmaz.

## ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI JAVASLATOK

A HYABAK szemcsepp használata nem igényel különleges ismereteket. Alaposan mosson kezet használat előtt.

A cseppentőtartály kinyitásához nem szükséges egyéb eszközt használnia. A HYABAK szemcsepp első használatakor úgy találhatja, hogy az első csepp megjelenése hosszabb ideig tart, ez az egyedi szűrőrendszer kialakítása miatt (lásd A készítmény leírása) lehet így.

Használat után a cseppentőtartály kupakját csavarja vissza.



### **A szem nedvesítése és síkosítása:**

**Adagolás:** mindkét szembe egy-egy csepp, szükség szerinti gyakorisággal a nap folyamán.

Cseppentsen egy csepp HYABAK szemcseppet a kötőhártyaszakba, miközben óvatosan lehúzza az alsó szemhéját és felfelé néz. Ezt követően óvatosan csukja be a szemét.



### **Kontaktlencsék nedvesítése és síkosítása:**

**Adagolás:** egy csepp az egyes lencsére behelyezéskor és eltávolításkor, illetve a nap folyamán szükség szerinti gyakorisággal.

Mielőtt a kontaktlencséjét beteszi, tegyen egy csepp oldatot a kontaktlencse belső oldalára, amikor az még az ujján van.

Helyezze be a kontaktlencsét a szokásos módon, majd pislogjon, hogy a folyadék egyenletesen el tudjon terülni a kontaktlencse és a szemfelszín között.

## AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készítmény egy személy többszöri használatára készült.

**A fertőzések átvitelének elkerülése érdekében több ember ne használjon közösen azonos cseppentőtartályt.**

Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét az első használat előtt. A biztonsági gyűrű sérülése esetén ne használja a készítményt.

A cseppentőtartály cseppentőjének csúcsát soha ne érintse hozzá semmilyen felülethez, így a szeméhez sem, mivel ez a készítmény szennyeződését eredményezheti.

Ha tünetei nem szűnnek vagy súlyosabbá válnak, vegye fel a kapcsolatot egészségügyi szakemberrel.

## FIGYELMEZTETÉSEK

Gyermekektől elzárva tartandó.

Használat után ne vezessen vagy kezeljen gépeket, ha a látása elmosódott, várjon néhány percet, amíg a látása kitisztul.

Két különböző szemészeti készítmény alkalmazása között várjon legalább 10 percet.

Ne higítsa fel, vagy keverje össze más készítménnyel.

Az első használat után alacsony légköri nyomás esetén a tartály szivároghat. A készítmény UV-sugárzás ellen védő tulajdonsága nem helyettesíti a napszemüveg viselését.

## MELLÉKHATÁSOK

A következő mellékhatásokat jelentették: ritkán előfordulhat a szem nyhe irritációja és vörösödése. Ezekben az esetekben a kontaktlencsét viselők el kell távolítsák a kontaktlencséjüket.

Amikor szemcseppet használ, tapasztalhat zavaró tüneteket, mint például égő, szúró érzést, idegtest érzését a szemben és homályos látást rövid ideig.

Ha a termék használata után bármilyen mellékhatást vagy szokatlan érzést észlel, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberhez, és jelentse az információt a helyi forgalmazónak, a gyártónak vagy a helyi egészségügyi hatóságnak (az elérhetőségeket lásd a használati útmutató végén).

## TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK ÉS EGYÉB, A KÉSZÍTMÉNY KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Tárolja a készítményt 8 °C – 30 °C között.

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy nedvességnek. Ne használja a címkén és a dobozon feltüntetett lejárati idő után.

A lejárati idő a hónap utolsó napjára vonatkozik, feltéve, hogy a csomagolás sértetlen és megfelelően tárolták.

Felbontás után legfeljebb 6 hónapig használható. Ezt követően a megmaradt készítményt ki kell dobni.

A készítményt a helyi útmutatásoknak megfelelően (a tartályt háztartási hulladékként, a dobozt és a használati útmutatót újrahasznosítható papírként) kell kezelni.

**A használati útmutató kiadási dátuma és verziószáma: 2022. augusztus, 5. verzió**

## Gyártó:

Laboratoires Théa 12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Franciaország [www.laboratoires-thea.com](http://www.laboratoires-thea.com)

Rész « Contact us »

## Forgalmazó:

Sager Pharma Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

## Illetékes egészségügyi hatóság:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 1135 Budapest, Szabolcs u. 33. ([amd.vig@ogyei.gov.hu](mailto:amd.vig@ogyei.gov.hu))